

口腔内絆創膏 オーラ エイド

安全！簡単！効果的！
粘膜に自己接着する
口腔内創傷のための新ツール


Ora-Aid

手術後や抜歯後の傷口の保護に


縫合した後の保護に

インプラント
施術後

抜歯後

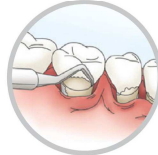

歯周施術後

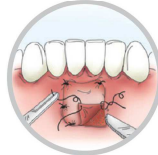

歯周治療後



矯正



口内炎




口腔創傷



刺激

What is Ora-Aid?

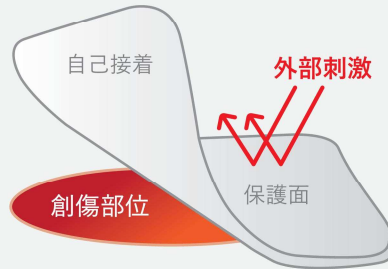

Ora-Aid は、非オイゲノールの口腔内保護パッドです。親水性ポリマーを用いた強力な接着で、ずれにくく、はがれにくいのが特長です。

特長

- 食物、細菌およびタバコの煙から口腔内創傷を保護
- 口腔内創傷の止血
- 二次感染を防ぐ
- 創傷部位の痛みを軽減する
- 矯正治療による痛みの保護
- フッ素の消失または敏感な歯の保護
- 縫合糸による刺激から舌を保護する
- 外科手術後の口腔内のリフレッシュ
- ミント風味が口臭を軽減
- 唾液による自己接着
- ささまざまな形やサイズに簡単にカット
- 親水性ポリマーを用いた強力な接着
- 安全で使いやすい
- ビタミンE含有

使用例

インプラント施術後



抜歯後



歯周施術後



歯周治療後




口内炎



矯正



口腔創傷

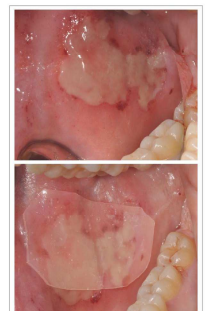


使用方法



1. 創面を消毒液または生理食塩水にてきれいに洗浄してください。



2. 外装を開封し、本品を取り出します。

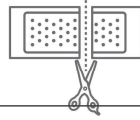

3. 必要に応じて適当なサイズに切ってください。



4. 剥離面を剥がし、接着面を創面に合わせ貼り付けてください。



5. 軽く3～5秒ほど押し付けてください。
※誤嚥防止のため、就寝前には本品を取り外してください。

製品一覧



製品番号：AG-202A
サイズ：25×15 mm
包装（/箱）：1枚入り / 袋 x 20

主な主成分・材料 *非ステロイド品

接着面（創傷部位面）

粘膜付着性合成セルロース、ビタミンE、ミントなど韓国薬局方、USP（米国薬局方）の規格に適合している原材料を使用。

保護面

水不溶性合成セルロース（飲み薬のカプセル等に使用されるもので万が一飲み込んででも胃で完全分解される材料）、その他韓国薬局方、USP（米国薬局方）の規格に適合している原材料を使用。

商品保護フィルム
（貼付後すぐに剥離）

ポリエチレンテレフタレート（PET）



注意事項

本品はシングルユース製品であり、使用は一回限りとし、再使用はしないでください。

- ・本品使用后、腫れ、アレルギー反応、感染症の兆候があった場合は、担当医師に相談してください。
- ・本品に損傷または汚染が見られる場合は、絶対に使用しないでください。
- ・出血の深い傷には使用しないでください。
- ・12歳未満の子供には使用しないでください。
- ・誤嚥防止のため、就寝前には本品を取り外してください。

製造販売届出番号：13B1X10100000074

Made in Korea